

準備物 検査用紙


動的量的視野検査-投影式視野計の準備(輝度調整)

図) 器械説明書より抜粋



目的


視野に影響する視標輝度と背景輝度の設定

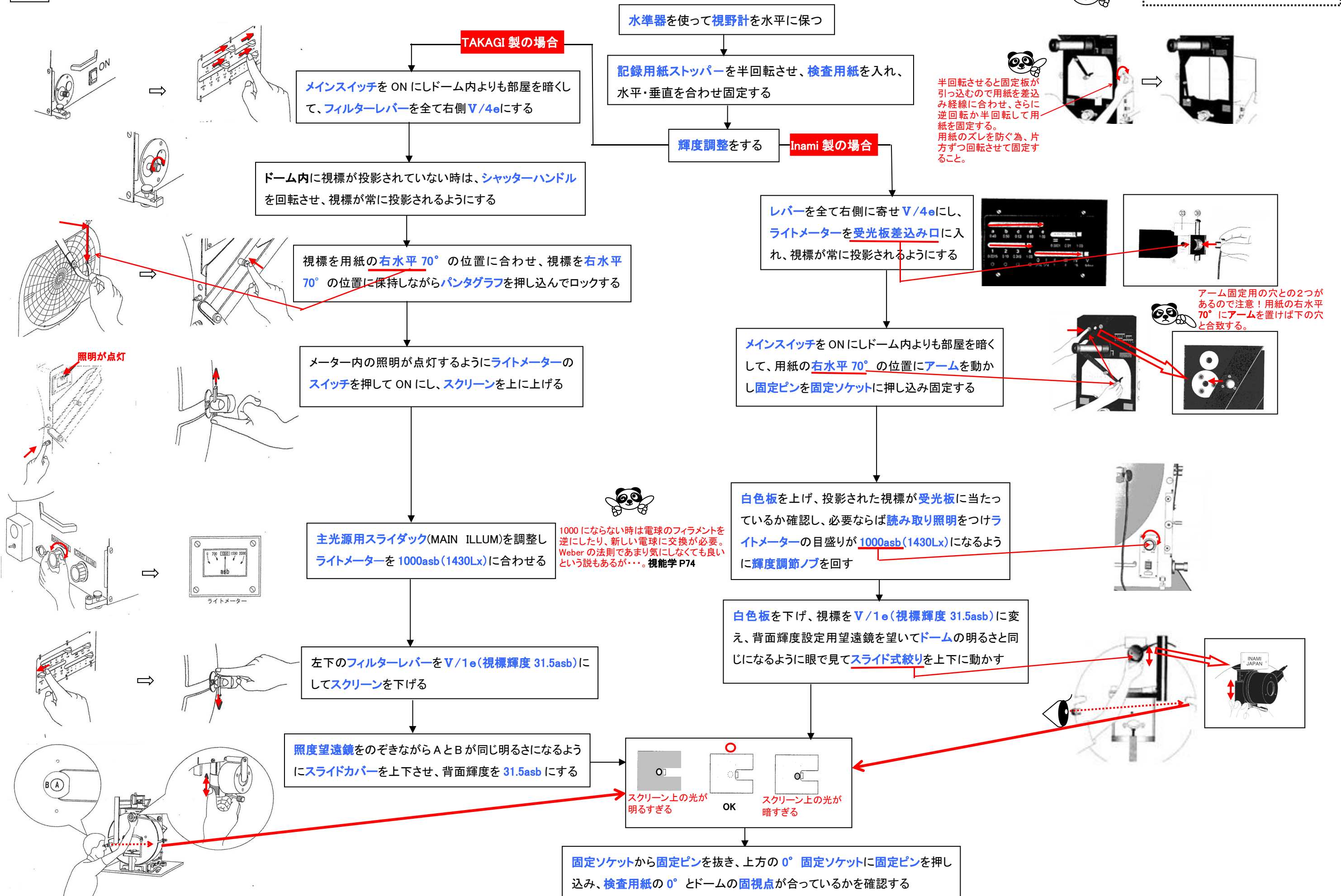

動的量的視野検査-投影式視野計の片付け

記録用紙ストッパーの左右を半回転させて、検査後の検査用紙を取り出す

フィルターレバーを全て右側に寄せる

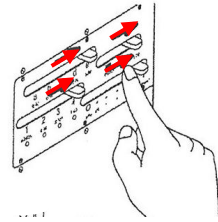

メインスイッチを切る

アームをロックせず側方に寄せ、ドームの切れ目に収め、
カバーをかぶせる



機械の移動時のみロックし、
通常はロックしない。