

Goldmann Perimeter(視野計)のメインランプ交換



目的

メインランプが切れた場合の交換

図) 器械説明書より抜粋

電源を OFF にし、ランプカバー抑え板を引き、ランプカバーを外す

熱くなっているのを素手で触らないように、付属のゴムチューブを用いてランプを外す。




ランプの突起がある部分を上にして挿入する

突起が当たるまでランプを回す

ランプカバーを取り付ける




ランプカバーを固定する

この後ランプが点灯することを確認し、輝度調整を行う

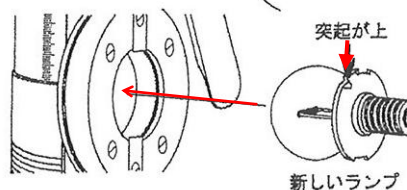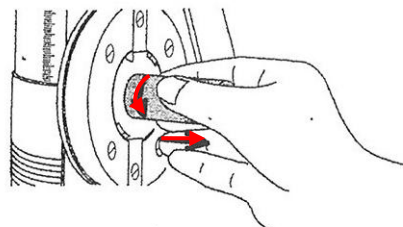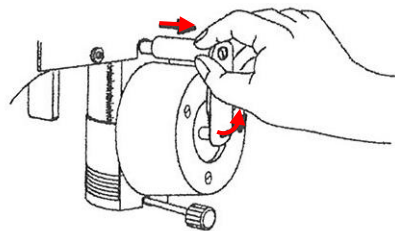

新しいランプ

突起が当たるまで回す

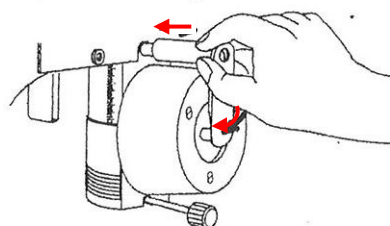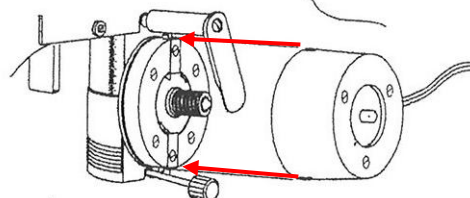
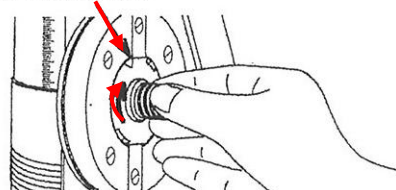


電球を決して素手で触らないこと。
すぐに切れる！

眼瞼挙上の方法

松元俊・森本誠子:眼で見る視野検査の進め方 P28

目的 上眼瞼や睫毛の影響による検査の不測や誤差の予防

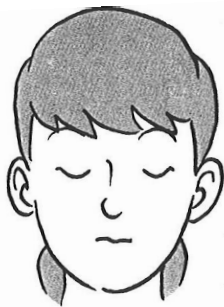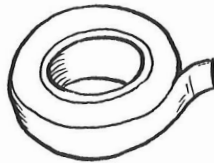

①静かに閉瞼させる



②眼瞼縁に近いところにテープの一端を貼る



③開瞼しテープの他端を額に貼る



④テープを貼ったまま閉瞼させる

テープを貼ったまま瞬目できるか確認する為。


非検査眼の遮閉方法

松元俊・森本誠子:眼で見る視野検査の進め方 P64


眼で見る視野検査の進め方改訂第2版 P28



- ①ガーゼや絆創膏が鼻の正中線を越えないこと。
- ②ガーゼ下で瞬目ができること。
- ③鼻側および下耳側が完全に遮閉されていること。

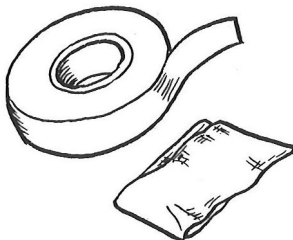

- ①検査しない方の眼を静かに閉瞼させる。
- ②眼瞼の上にガーゼを当て、落ちないように患者に軽く押さえてもらう。
- ③隙間のないように2箇所をテープで止める。

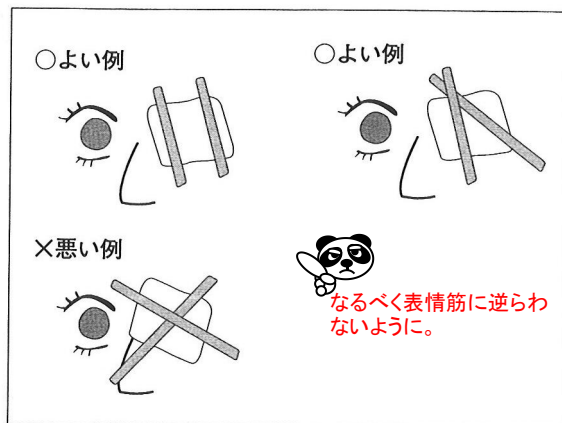

なるべく表情筋に逆らわないように。

改訂第2版 P28 では変更されていました。



ガーゼには、瞬きができるくらいのふくらみを持たせる。ただし、検査眼の視野に影響しないよう、鼻側のふくらみは少なめにする。

