

簡易な視野検査-Forsters(フェルスター・フェステル)視野計



目的

視野障害の簡便な検査

準備物 フェルスター視野計・色視標・記録用紙・筆記用具



フェルスター視野計

被検者の片眼を遮閉し、顎を**支持器**のへこみの上に左右眼に応じて置くように指示し、検査眼の下眼瞼辺りに白プレートが当たり**弓**の中心点に眼の高さが来るように支持器の高さを調節する

被検者に前方の**弓**の中央の**0°**を注視させ眼を動かさないように指示し、弓を垂直にする

柄がついている視標を**弓**の一端(**100°**)から**弓**の内面に沿って徐々に中央に向かって移動し見えた時点で、被検者に合図させる


記録用紙にその方向での広さを記録する

視線を軸として**弓**を**45°**回転させ、上・下・左・右・各斜め方向の**8**方向を順次計測し、凹凸があった位置はその付近をさらに細かく計測して記録し、線でつなぐ

視標の色を変えて同様に行う

他眼も同様に行なう

結果・記載例)

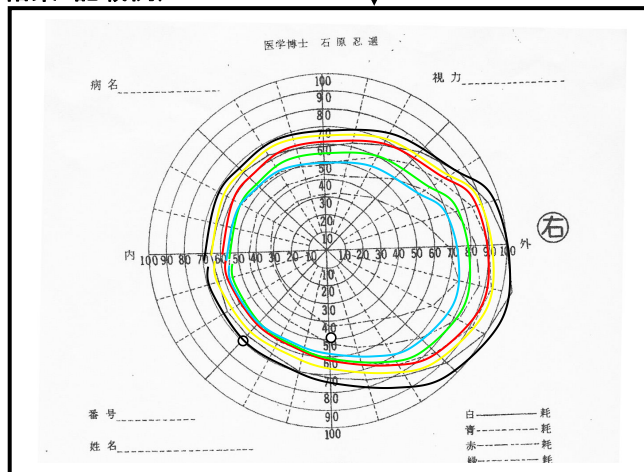

自分の検査結果を書いておこう！

自分の検査結果を書いておこう！

医学博士 石原 忍 通

病名 _____ 視力 _____

番号 _____

姓名 _____

年齢 _____

平成 年 月 日

右

左


白 _____ 鈍

青 _____ 鈍


赤 _____ 鈍

緑 _____ 鈍

概要

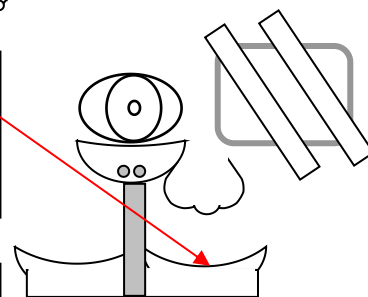

視標には、直径
2mm・5mm・1cm・
2cmのものがあり、白・
青・黄・赤・緑の5色がある。

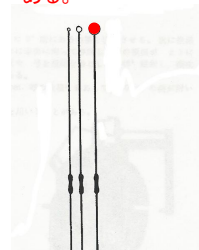

視標は弓の面に沿って移動させるが、音をたてたりしないこと。



弓の後部に目盛があるよ！

判定基準)

色視標による視野の広さ

	上	下	耳側	鼻側
白	60	70	100	60
青	50	60	90	50
赤(黄)	40	50	80	40
緑	30	40	70	30