

各視標の立体視差について $1^{\circ} = 60' \text{分} = 3600'' \text{秒}$

Titmus ステレオテスト

バタフライステレオテスト

New ステレオテスト

TNO ステレオテスト

蝶 3000'' 羽先端 3553sec

ハエ 3000''

Circle

	正答	
1	下	800sec
2	左	400sec
3	下	200sec
4	上	140sec
5	上	100sec
6	左	80sec
7	右	60sec
8	左	50sec
9	右	40sec

Animal

	正答	
A	ネコ	400sec
B	ウサギ	200sec
C	サル	100sec

第一表あげは蝶

	触角	前羽	後羽尾
40cmにおける 立体視角(秒)	4120	3350	770

第二表(1) 升目図形

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40cmにおける 立体視角(秒)	800	400	200	140	100	80	60	50	40
正解	右	上	上	下	左	下	上	右	左

(2) トランプ図形

	A	B	C
40cmにおける 立体視角(秒)	400	200	100
正解	クラブ	ハート	ダイヤ

第三表(1) 升目図形

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40cmにおける 立体視角(秒)	800	400	200	140	100	80	60	50	40
正解	上	右	左	左	下	上	右	下	右

(2) トランプ図形

	A	B	C
40cmにおける 立体視角(秒)	400	200	100
正解	スペード	ダイヤ	クラブ

TNO

Plate I ~ III スクリーニング用 33' (1980'')

Plate IV 抑制検査用

Plate V ~ VII 定量用

		正答	
Plate V	上段 右	左	480sec
	下段 右	下	240sec
Plate VI	上段 右	左	120sec
	下段 右	右	60sec
Plate VII	上段 右	右	30sec
	下段 右	左	15sec

RANDOT ステレオテスト

丸、星、E	500sec
四角、三角、クロス	250sec

Animal

	正答	
A	ネコ	400sec
B	ウサギ	200sec
C	サル	100sec

Circle

	正答	
1	左	400sec
2	右	200sec
3	左	140sec
4	中	100sec
5	右	70sec
6	中	50sec
7	左	40sec
8	右	30sec
9	中	25sec
10	右	20sec

Lang I

ネコ	1200sec
星	600sec
車	550sec

Lang II

象	600sec
車	400sec
星、月	200sec

KAT ステレオテスト

左側ページ 定量用	スクリーニング用
1 2	800"
3 4	200"
5 6	100"

Frisby ステレオテスト

cm	6mm	3mm	1.5mm
30	600sec	300sec	150sec
40	340sec	170sec	85sec
50	215sec	110sec	55sec
60	150sec	75sec	40sec
70	110sec	55sec	30sec
80	85sec	40sec	20sec

Pola テスト

精密立体視テスト

+	4'
□	3'
▽	2'
○	1'
	0.5'

トランプ

ダイヤ	4'
スペード	3'
ハート	2'
クラブ	1'

大型弱視鏡

RANDOM-DOT スライド

OUT の文字を外側に！

左 眼

360/720 基準スライド
D73

右 眼

720" (C)	D76
720" (H)	D78
720" (+)	D80
360" (C)	D75
360" (H)	D77
360" (+)	D79
360/720	D73

左 眼

90/180 基準スライド
D83

右 眼

180" (C)	D86
180" (H)	D87
180" (+)	D90
90" (C)	D85
90" (H)	D88
90" (+)	D89
90/180	D83